

CA-2000 (AT-2000) Ethylotest électronique



CA-2000 est un appareil individuel de mesure de taux d'alcoolémie très précis.
Simple en utilisation. Indication digitale sur écran LED trois chiffres.

Fil d'alimentation pour allume-cigarette, ainsi que 5 embouts jetables inclus.

UTILISATION

- Insérez l'embout dans l'admission de souffle. Appuyez sur le bouton de mise en marche.
- L'appareil commencera le cycle de test de nettoyage et indiquera une séquence de compte à rebours.
- Après le signal sonore (et la lumière verte "READY") expirez modérément et continuellement jusqu'au nouveau bip.
- Une fois l'échantillon de souffle prélevé, l'écran indique la valeur de T.A.S. mesurée dans 3 secondes pendant 15 secondes.
- Pour plus de précision, effectuez le test suivant dans au moins 2 minutes.

PRECAUTIONS

- Effectuez le test au moins 20 minutes après la dernière consommation d'alcool – dans le cas contraire les indications seront exagérées à cause de la présence des vapeurs d'alcool dans la bouche.
- Evitez d'effectuer le test dans des pièces fermées, avec faible ventilation ou climatisation.
- Remplacez la batterie quand l'indicateur "BATT LOW" s'allume.
- Ne soufflez pas des fumées de tabac ou liquides dans l'appareil – le capteur sera abîmé.
- Gardez l'appareil en dehors de la portée des enfants.
- Bien que CA2000 (AT2000) soit un appareil précis, ses indications n'ont pas de valeur de preuve juridique. **De manière générale, les tests d'alcoolémie de doivent pas être utilisés comme excuse pour conduite en état d'ivresse.**
- Gardez l'appareil entre 0 – 40 °C.
- Dans les conditions d'utilisation normales, CA2000 (AT2000) a besoin de recalibrage tous les 3-6 mois pour assurer des résultats précis. Contactez le distributeur local pour recalibrage.
- Déconnectez le fil d'alimentation pour allume-cigarette immédiatement après l'utilisation de l'appareil.

SPECIFICATIONS

Dimensions, cm	12.0 x 6.0 x 2.5
Poids, grammes	200
Capteur	Semi-conducteur
Temps de mise en marche	< 20 secondes
Temps de réponse	3 secondes
Affichage / Unité de mesure	LED trois chiffres / gramme/litre de sang (taux limite actuel = 0.5 g/l)
Précision	±.1g/l @ 1.0 g/l (gramme/litre de sang)
Alimentation	Batterie 9V alcaline ou 12V (allume cigarette)

GARANTIE

L'appareil est garanti pendant 1 an (après l'achat) d'utilisation normale pièces et main d'œuvre (à l'exclusion du capteur et calibrage). L'engagement du fabricant sous cette garantie est limité à remplacement, ajustement, ou réparation de l'appareil si retourné avec la preuve d'achat. Cette garantie est caduque dans le cas de mauvaise utilisation, entretien défectueux ou interventions effectuées par des personnes non agréées.

NON RESPONSABILITÉ

La vente de cet appareil est soumise à la condition expresse que ni le fabriquant, ni le distributeur ou le détaillant ne peuvent être tenu responsable pour la précision de tout test d'haleine obtenu avec l'appareil, de même que toute dommage et/ou blessure, dommage résultant directement ou indirectement de l'utilisation de l'appareil.

SERVICE

Votre appareil doit d'être calibré régulièrement pour maintenir sa précision (tout comme vous devez faire un changement d'huile sur votre voiture). La fréquence de calibrage dépend de fréquence d'utilisation. Il est généralement recommandé de calibrer au moins une fois tous les 6 mois. Nous vous conseillons alors de nous renvoyer l'appareil pour vérification et calibrage.